

必要な性能をしっかり搭載した
スタンダードモデル

Centuria

L I T E

平面昇降式フローティング撮影台
〔センチュリア ライト〕



オリオン・ラドセーフメディカル株式会社

一般医療機器 / 汎用X線診断装置電動式患者台
特定保守管理医療機器 / 設置管理医療機器
届出番号 : 23B2X00016P00059

主な特長

●低床設計だから、乗り降りスムーズ

電動式で天板の高さを最下位350mmまで下げられるので被験者の負担を軽減
術者の撮影業務の効率も向上します。

●昇降の中間一時停止も簡単に調整可能

上下両方向から任意の高さに一時停止できます（上下2系統を準備）
設定したい高さで停止させフットスイッチの上昇、下降とペダルを順に間を開けずに踏み込み10秒間
続けると設定できます
※出荷時は上昇時700mm、下降時430mmで一旦停止。上昇・下降時とも同じ高さに設定可能

●スプライン機構とスローダウン機構を採用

これにより撮影台を守り、衝撃を和らげるスマート下降を実現

※スプライン機構：天板上無負荷の時、下降時に障害物が挟まってでも下降動作が停止して


撮影台や障害物の損傷を防ぎます ※人体への安全機構ではありません

スローダウン機構：パンタアーム式昇降の機構上、低い位置からの下降速度が若干速くなり、
停止時に軽い衝撃が発生します。床上約500mmの高さからの下降速度を自動で半減させて
その衝撃を和らげます


■標準装備



●フットスイッチ

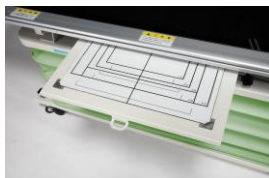

●グリッド着脱

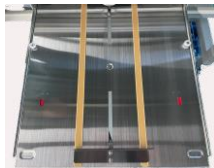

●14・17インチストッパ



●アルミフレームカバー



●テープスイッチ



●キャスター・アジャスター ・つま先が入るスペースを確保



オプション



●患者グリップ



●固定バンド



●側面カセットホルダ

■その他オプション

●グリッド ●寝台マット ●管球連動機能

■保守点検プランのご案内

長期間にわたり安心してご利用いただけるよう、充実したアフターサービス体制を整えています。定期的な保守点検プランをご用意し、製品の安定稼働をサポートいたします。

■仕様

昇降駆動方式	電動式
天板部寸法	D800×W2040(mm)
天板材質	アクリル樹脂(t10mm)
天板面の高さ	床350～最高900(mm)
天板移動範囲	長手±500mm・短手±119mm(手動式)
天板固定方式	電磁オフロック式
受像部移動範囲	180mm
カセット種類	FPD・CRカセット
カセットサイズ	半切縦横以下各サイズ
グリッドサイズ	465×465(mm)
耐荷重	135kg
重量	約210kg
電源	AC100V 0.5KVA 50/60Hz

※印刷の為、製品の色が実物と異なる場合がありますのでご了承ください。

第二種医療機器製造販売業許可番号(23B2X00016)
(社)日本画像医療システム工業会会員/日本理学療法機器工業会会員



オリオン・ラドセーフメディカル株式会社

東京本社 〒141-0031 東京都品川区西五反田二丁目12番3号
第一誠実ビル4階
電話 03-5759-6011 FAX 03-5759-6022
大阪営業所 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号
SORA新大阪21ビル6階
電話 06-6396-8327 FAX 06-6396-8323
松本営業所 〒399-0011 長野県松本市寿北一丁目12番18号
オフィス・ナガサワ2階8号
電話 0263-26-5626 FAX 0263-26-5444

名古屋本社 〒490-1205 愛知県あま市花正郷中25番地
電話 052-449-2670 FAX 052-449-2671
金沢営業所 〒920-0807 石川県金沢市乙丸町甲165
電話 076-252-5999 FAX 076-252-2946
仙台営業所 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目字南97番3号
東インター斎喜ビル4F
電話 022-706-1582 FAX 022-287-3077
福岡営業所 〒812-0895 福岡県福岡市博多区竹下4丁目7番27号
電話 092-518-1195 FAX 092-483-7513