

内視鏡用真空固定具

ERCP MedVac

多彩な内視鏡手技において患者さんを強くやさしく固定

内視鏡検査・処置での患者さんを固定して体動の影響を大幅に削減でき、検査時間短縮や画質向上に貢献します。また、腕ストラップ※が両腕の固定に効果的です。

※オプション



- 医療現場に適した耐久性・撥水性の高いビニール素材を採用
- 内部ビーズが、偏らずに適切に配置された構造が患者さんの体を包みやすく、真空固定効果を高めます。

使用方法

1. 寝台にERCP MedVacを広げた状態で患者さんが腹臥位の体位となります。
2. ERCP MedVacを患者さんの体に包み込み、付属ベルトで固定します。
3. 必要に応じて、両腕固定のストラップ※を患者さんの手首付近に取り付けます。
4. バルブにポンプを取り付け、ERCP MedVac 内の空気を排気すると、真空固定されます。
5. 内視鏡検査や処置の終了後は、ベルトを緩め、バルブを開放して真空状態を回避します。

仕様

外形寸法	幅 1850m × 奥行 1360mm
------	---------------------



オリオリラドセイメディカル株式会社

販売名：真空固定具
全身画像診断・放射線治療用患者体位固定具
クラス I / JMDNコード 40902000
届出番号：23B2X00016W000010

東京本社 〒141-0031 東京都品川区西五反田二丁目12番3号
電話 03-5759-6011 FAX 03-5759-6022
大阪営業所 〒532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目1番3号
電話 06-6396-8327 FAX 06-6396-8323
松本営業所 〒399-0011 長野県松本市寿北一丁目12番18号
電話 0263-26-5626 FAX 0263-26-5444
名古屋本社 〒490-1205 愛知県あま市花正郷中25番地
電話 052-449-2670 FAX 052-449-2671

金沢営業所 〒920-0807 石川県金沢市乙丸町甲165
電話 076-252-5999 FAX 076-252-2946
仙台営業所 〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目字南97番3号
電話 022-706-1582 FAX 022-287-3077
福岡営業所 〒812-0895 福岡県福岡市博多区竹下4丁目7番27号
電話 092-518-1195 FAX 092-483-7513

※改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さい。

第二種医療機器製造販売業許可番号 (23B2X00016) (社) 日本画像医療システム工業会会員/日本理学療法機器工業会会員