

患者固定バンド

New

# FlexHold


## 5cm幅の制約を超える新しいMRI患者固定バンド

### ● MRI検査現場の課題

- ・ 幅5cmの純正固定ベルトしか使えない装置が多い
- ・ 固定力不足により体動が発生し、画質低下の原因に


### ● FlexHold が課題解決へ

- ・ 30×50cmの幅広い患者固定バンドで、安定した体動抑制を目指す
- ・ 観音開き構造により、幅5cmの純正固定ベルトを内部に収納可能
- ・ 純正ベルト本来の寝台接続強度を維持
- ・ FlexHold付属ベルトでマジックテープ無しの純正ベルトも固定可能

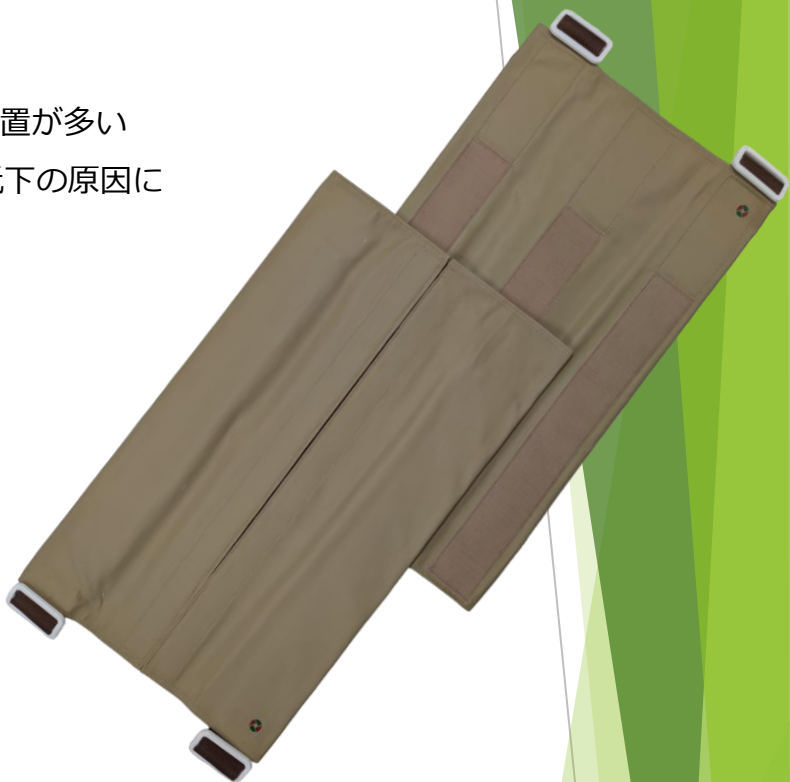

### セッティングイメージ


FlexHoldに幅5cm純正ベルトを装着して患者さんを固定

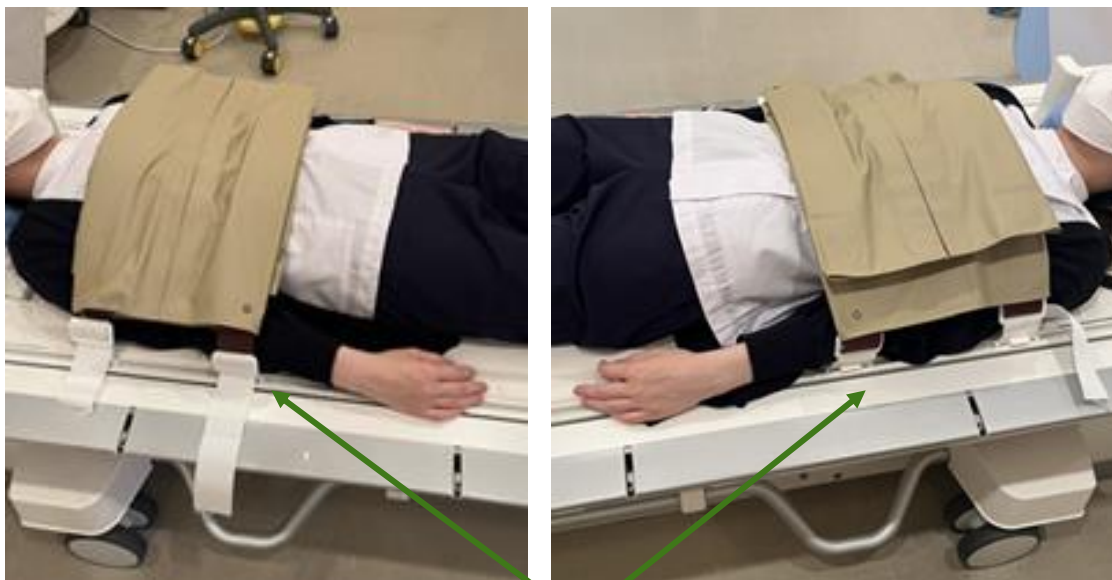

純正ベルトとMRI寝台との接続強度は維持

## ● 純正ベルトを本体に直接固定する方法

- 本体マジックテープ部（オス）に  
純正ベルトマジックテープ部（メス）を固定

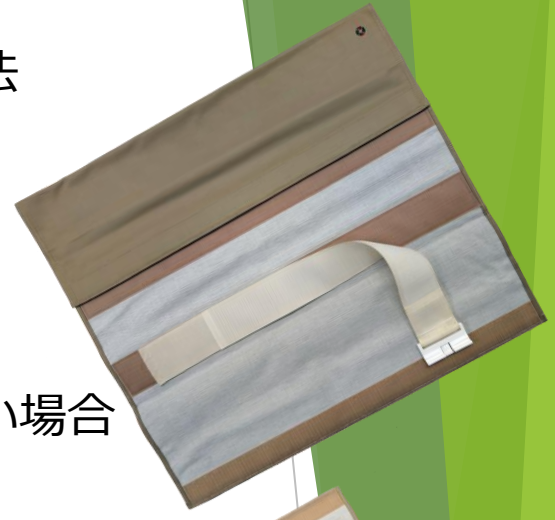


## ● 純正ベルトと本体を直接固定出来ない場合

- FlexHold付属ベルトのHカンバックルに  
純正ベルトを通して固定



- FlexHold付属ベルトと本体を  
マジックテープ部で固定

- 純正ベルトの余ったベルト部分を  
観音開き内部に収納

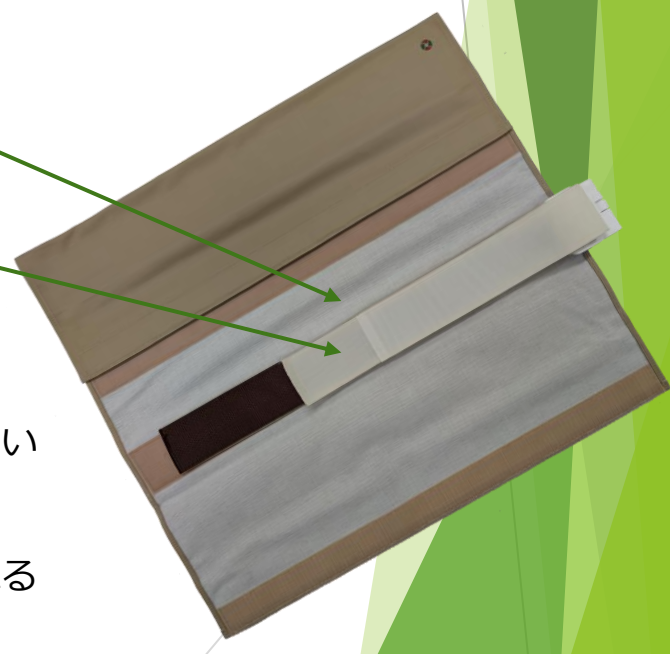

## ● FlexHoldの高品質素材

- 軽くて柔らかく、患者さんにやさしい
- 高耐久・撥水性
- 公共施設の椅子座面用にも採用される  
信頼性の高い生地

仕様	外形寸法	幅 500mm × 奥行300mm 2枚
----	------	----------------------

写真提供施設：岡山済生会総合病院



※改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。予めご了承下さい。